

## Instrukcja obsługi

**Ławka wgłębna do wanny**

**Kod produktu KING-BS-20**

Szanowni Użytkownicy,

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Mamy nadzieję, że wybrany sprzęt spełni Państwa oczekiwania. W związku z tym przedstawiamy kilka istotnych informacji.

Timago International Group to polska firma dystrybuująca produkty medyczne rehabilitacyjne i ortopedyczne do aptek i sklepów medycznych.

Na co dzień dbamy o Państwa komfort oferując produkty o wysokiej jakości, funkcjonalne i bezpieczne.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w branży. Nasze produkty za sprawą dystrybutorów trafiają do szerokiego grona użytkowników w Polsce i Europie.

Jako firma otwieramy się na Państwa potrzeby. Zależy nam, aby świadomie i umiejętnie wykorzystywano nasze produkty w leczeniu i rehabilitacji, poprawiając własny komfort i jakość życia.

Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi informacjami na naszej stronie internetowej.

**[www.timago.com](http://www.timago.com)**



## 1. Wstęp

Przed przystąpieniem do użytkowania produktu należy sprawdzić, czy sprzęt nie zawiera ewentualnych uszkodzeń mogących wystąpić podczas transportu. Jeżeli taka sytuacja wystąpiła prosimy o kontakt z punktem sprzedaży.

Następnie ważnym jest zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji, która zawiera istotne dla użytkownika informacje.

W przypadku pytań dotyczących korzystania ze sprzętu prosimy o kontakt. Nasi pracownicy na bieżąco udzielą Państwu niezbędnych informacji.


Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że jeżeli posiadają Państwo pytania w zakresie innym niż użytkowanie produktów, prosimy o skontaktowanie się z lekarzem, pielęgniarką lub fizjoterapeutą.

## 2. Wykonanie

Ławka wgłębna do wanny składa się z siedziska oraz wyprofilowanej aluminiowej ramy zakończonej nasadkami antypoślizgowymi, które uniemożliwiają przesuwanie się ławki na wannie, a także zapewniają pacjentowi bezpieczeństwo oraz stabilność podczas kąpieli. Regulowana rama pozwala na dostosowanie ławki do różnych szerokości wanien, a wykorzystanie PCV na siedzisku aluminiowej ramy umożliwia jej długotrwałe użytkowanie. Całość wykonana jest z materiałów o podwyższonej wytrzymałości na wilgoć.

### Zestaw zawiera:

- Siedzisko PCV
- Elementy ramy bocznej – 4 szt.
- Nasadki antypoślizgowe – 4 szt.
- Śruby montażowe – 4 szt.

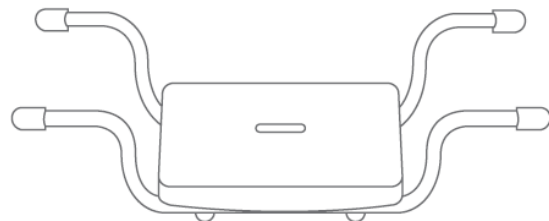

## 3. Zastosowanie

Ławka wgłębna do wanny jest sprzętem pomocniczym ułatwiającym użytkownikowi korzystanie z wanny podczas czynności higienicznych. Polecana jest osobom o obniżonej sprawności ruchowej, która uniemożliwia bądź utrudnia samodzielne wykonywanie czynności życia codziennego.


#### 4. Montaż i główne zalecenia użycia

- **Uwaga!** Podczas montażu i regulacji należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji. Użytkownicy z obniżoną sprawnością ruchową mogą potrzebować pomocy osoby trzeciej, która posiada odpowiednie umiejętności.


**Uwaga!** Nie należy używać ławki w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek widocznych lub wyczuwalnych uszkodzeń (np. pęknięcie), ponieważ grozi to wypadkiem.

**Uwaga!** Przed pierwszym użyciem ławki należy sprawdzić poprawność montażu.


**Krok 1.** W pierwszej kolejności należy zamontować nasadki antypoślizgowe na aluminiowych elementach ramy.

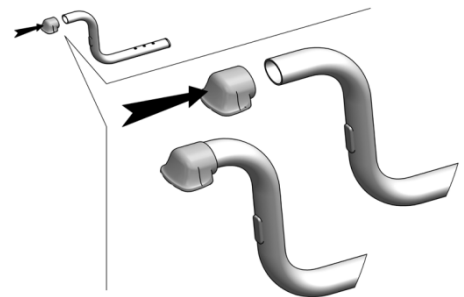


**Krok 2.** Następnie w otworach montażowych ławki należy zamontować elementy ramy bocznej kolejno z jednej i drugiej strony siedziska.

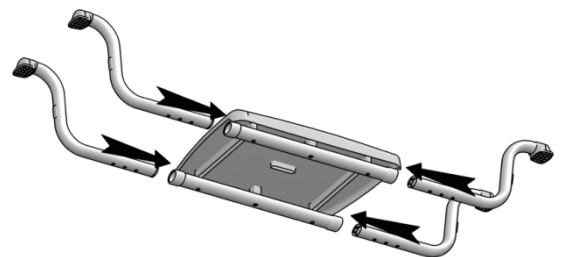

**Krok 3.** Szerokość ramy ławki należy dopasować poprzez wybranie odpowiedniego otworu montażowego na bocznych elementach ramy.

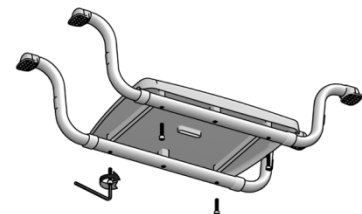

**Krok 4.** Następnie za pomocą czterech śrub montażowych należy przykręcić boczne elementy ramy do siedziska przy pomocy klucza imbusowego (5mm).

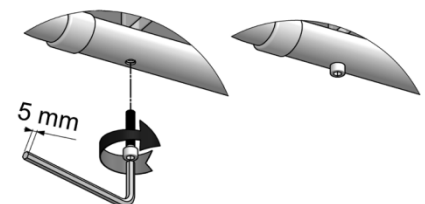

**Krok 5.** Należy sprawdzić, czy wszystkie elementy ławki zamontowane są poprawnie oraz czy szerokość jest dopasowana i ustawiona prawidłowo na wannie.

## 5. Specyfikacja techniczna

<b>Szerokość całkowita</b>	67-77 cm
<b>Szerokość wewnętrzna</b>	50-60 cm
<b>Głębokość</b>	18 cm
<b>Wymiary siedziska</b>	37 x 30 cm
<b>Waga ławki</b>	1,49 kg
<b>Maksymalne obciążenie</b>	125 kg

## 6. Uwagi i zalecenia

- Rama ławki powinna mieć szerokość odpowiadającą szerokości wanny, nasadki antypoślizgowe powinny być pewnie oparte na brzegu wanny.
- Podczas czynności higienicznych z ławki może korzystać tylko jedna osoba.
- Osoby z obniżeniem sprawności ruchowej podczas korzystania z ławki wymagają asysty osoby trzeciej.
- **Nie wolno** stawać na ławce.
- **Nie należy** przesiadać się, a w przypadku pomocy osoby trzeciej - przenosić użytkownika, z ławki na dno wanny.
- **Nie należy** opierać się o ławkę, w celach innych niż siadanie i wstawanie.
- **Nie należy** przytwierdzać przedmiotów do ławki, ponieważ może być to przyczyną wypadku.
- **Nie należy** przekraczać maksymalnego obciążenia ławki (125 kg).
- W łazience należy usunąć możliwe przeszkody oraz sprawdzić, czy podłoże jest równe. Śliskie podłoże należy zabezpieczyć, np. matami antypoślizgowymi.
- Ławka przeznaczona jest do stosowania tylko na równych, płaskich powierzchniach.
- Ze względu na ryzyko upadku niedopuszczalne jest użycie ławki wgłębnej na podłożu nie dającym pewnego oparcia.
- **Nie należy** dokonywać samodzielnych napraw lub przeróbek konstrukcyjnych, wszelkie naprawy należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi Wytwórcy.

- Nie należy przechowywać ławki w pomieszczeniach o bardzo wysokiej wilgotności (łaznie, pralnie itp.), w ujemnej temperaturze lub na wolnym powietrzu.

**UWAGA! Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z ławki, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.**

## **7. Konserwacja**

- Ławkę należy czyścić regularnie używając wody, gąbki i łagodnych środków czyszczących do tworzyw sztucznych np. mydła lub delikatnych detergentów posiadających atest PZH, po każdym użyciu wytrzeć do sucha.
- **Nie należy używać** do czyszczenia: silnych detergentów, środków ściernych, wybielaczy, benzyny ani żadnych rozpuszczalników (grozi uszkodzeniem ramy, widocznymi ubytkami, a w konsekwencji - utratą praw gwarancyjnych).
- Co najmniej raz na 3 miesiące należy wykonać przegląd wizualny wszystkich elementów wyrobu w tym:
  - stan śrub montażowych
  - stan rurek (pod kątem pęknięć)










## **8. Dane dotyczące gwarancji**

Wszystkie produkty dystrybuowane przez naszą firmę objęte są gwarancją, której warunki zostały opisane w karcie gwarancyjnej, jaką otrzymali Państwo w momencie zakupu. Chcielibyśmy jednocześnie zwrócić uwagę, że do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

Jako firma przyjazna użytkownikom, dostarczamy wyłącznie produkty sprawdzone, pod względem materiałowym, jakościowym i funkcjonalnym.

Jeżeli posiadają Państwo pytania dotyczące procedury serwisowej prosimy o kontakt.

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Wytwórca
	Numer partii		Data produkcji
	Numer seryjny		Reprezentant w Unii Europejskiej
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Wytwórca dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

## 10. Produkty polecane

W ofercie Timago International Group znajdują Państwo m.in.:

- Ortezy i stabilizatory stawów
- Wózki inwalidzkie ręczne i specjalne
- Balkoniki i podpórki do chodzenia
- Kule i laski
- Łóżka rehabilitacyjne
- Sprzęt pomocniczy i sanitarny
- Sprzęt i akcesoria przeciwośluzynowe
- Pasy stabilizujące i unieruchamiające
- Sprzęt elektromedyczny
- Jednorazowy sprzęt medyczny

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów.

Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)



**Wytwórca:**

**LM GLOBAL Design Limited**

Suite 74, Guinness Enterprise

Centre, Taylor's Lane,

D8 Dublin, Ireland



Wydanie I, data aktualizacji 28.07.2016